



Инструкция по самостоятельному забору биологического материала (буккальный эпителий)

1. Прополосните рот чистой водой (детям - дать попить воды). Если после еды прошло больше часа, делать это необязательно.

2. Подпишите бумажный конверт: ФИО участника



3. Подготовьте 2 ушные ватные палочки. Отрежьте ватный наконечник с одной стороны палочки и выбросьте его.



4. Не прикасаясь к вате на палочке, тщательно потрите ватной палочкой по внутренней стороне щеки, при этом вращая ее вокруг своей оси, примерно 10 секунд, стараясь охватить всю поверхность внутренней стороны щеки.

5. Положите палочку в конверт. Тоже самое сделайте со второй палочкой.



6. Отправьте нам с помощью любой службы доставки или принесите самостоятельно в наш медицинский центр.

7. Оплатите стоимость теста через любой банк и сообщите нам об оплате или оплатите в нашем медицинском центре.